



- Zahntechnische Analyse - Planung - Realisation
- Speziallabor für hypoallergenen Zahnersatz

RICHTIGE PROTHESENPFLEGE

- Prothese oder Zahnschiene **keinesfalls** in heißem Wasser reinigen!
- Reinigungstabletten sind teuer und schädlich für den Kunststoff. Prothese daher ganz einfach mit einer Zahnbürste und Zahnpaste reinigen.
- Aufbewahrung in verdünnter Mundspüllösung oder Wasser.
- Bei der Reinigung muß insbesondere der Zahnbelag entfernt werden. Er ist besonders gut bei trockenem Zustand der Prothese sichtbar. Die Prothese daher nach der Reinigung zur Kontrolle nachtrocknen.
- Es ist Ihnen dahingestellt, die Prothese auch bei Nacht zu tragen.



ZAHNKLAMMERN AUS KUNSTSTOFF

Auf Wunsch stellen wir für Sie ihre Zahnklammern in modernem hochfestem Kunststoff her.

Vorteil: Die Zahnklammer ist kaum sichtbar und schont auf Grund ihrer geringen Härte den Zahnschmelz.